

Vous informe !

Le système PUL permet une propulsion douce, physiologique laissant une grande liberté de mouvement à l'ATM et son ménisque, en latéralité, mais surtout en rétroposition grâce aux ressorts mandibulaires.

En effet, à chaque déglutition (2000 fois par jour), le couple condyle-ménisque peut se repositionner dans sa cavité glénoïde conservant ainsi une ATM fonctionnelle, **soulageant la tension ligamentaire et réduisant le risque d'inflammation**, pour une meilleure croissance condylo-mandibulaire.



Problème rencontré : Ecrasement **normal** de certains ressorts, dû à une sollicitation musculaire importante.
(Informez le patient le jour de la pose du PUL « que c'est normal »)

NOUVEAU !! Solution : Le « mini-tube fendu à sertir » à la place du ressort écrasé.



Ressort écrasé



Retirer les spires restantes
(Pince à ligature)



Sertir le mini-tube fendu
(Pince de Weingart)



Mini-tube fendu à sertir à la place du ressort écrasé.

(Sachet de 20)

Gain de temps au fauteuil – Maintien de la propulsion

Bon de commande et mémo des différentes versions du PUL à télécharger sur le site www.pulconcept.com