


Note d'information et conseils concernant : Le PUL 2

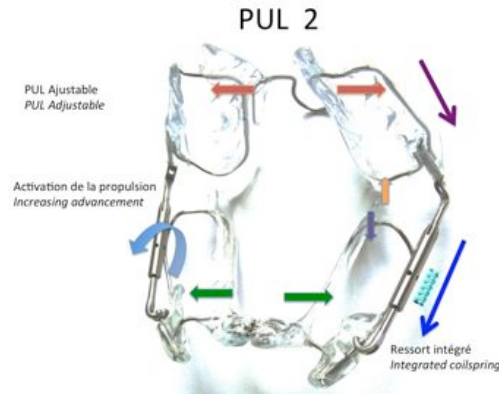

Harmoniseur 4D : fonctionnel, sagittal, transversal, vertical

Avantages :

- Une seule pièce : facilité de pose pour le jeune patient et gain de temps au fauteuil pour le praticien
- Ressorts (amortisseurs ATM) intégrés et protégés : indéformables
- Augmentation de la propulsion par dévissage du système (3 tours = 1mm) jusqu'à 6 mm : correction plus rapide


A noter:

- Ouverture buccale limitée à la rotation condylienne, ce qui est suffisant pour le patient. L'informer que toute ouverture maximale (bâillement) fait décrocher les gouttières, ce qui est tout à fait normal et ne présente pas de problème particulier pour le patient.



Conseils :

- Avoir un PUL 2 de démo pour montrer au patient et l'informer que le PUL 2 « est un appareil mobile et qu'il est normal qu'il ne tienne pas bien sur les dents, la langue devant le maintenir (rééducation linguale et harmonisation fonctionnelle) »
- Expliquer et donner au patient la fiche d'information PUL du concept « Orthoclass » en surlignant ces informations.

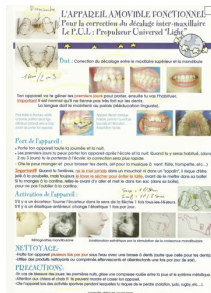

Extraits des conférences «L'harmonisation 4D : le Concept PUL» Dr Callabe

Autres extraits : www.pulconcept.com . Videos sur « Youtube : Pulconcept » www.orthoclass.com
 Pour adhérer au Club PUL et recevoir des infos : clubpul-subscribe@domeus.fr